

Prüfung des DAC-UNIVERSAL

Arbeitsanleitung zur Handhabung von Reinigungsindikatoren und SDS-Lösung

Produkt: **DAC-CHECK**
 RE-TVA-1
 DAC-UNIVERSAL
 SDS-Lösung

Die Produkte sind für die Validierung, Leistungsbeurteilung und Routineprüfung geeignet. Die Prüfung der Reinigungsleistung mit Reinigungsindikatoren / SDS-Lösung ist gemäß den Vorschriften $\frac{1}{4}$ -jährlich erforderlich, um die Stabilität der Prozesse zu belegen. Dies gilt auch bei jährlicher Leistungsbeurteilung der Geräte.



Bild 1: DAC-CHECK
Adapter zum Anschluss
an den DAC-UNIVERSAL



Bild 2: RE-TVA-1
Reinigungsindikator
passend zum Adapter Bild 1



Bild 3: DAC-UNIVERSAL
mit Adaptern und Indikatoren



Bild 4: SDS-Lösung zur
Spülung realverschmutzter
Instrumente

Wir empfehlen die Prüfung des DAC-UNIVERSAL zur Aufbereitung von Winkelstücken und Turbinen mit 2 Indikatoren (siehe Bild 3).

Vorgehensweise:

- Den Spülkopf des DAC-UNIVERSAL mit 2 Adaptern (Bild 1) bestücken
- Die Indikatoren (Bild 2) aus der Verpackung nehmen, die Verschlüsse an den Enden entfernen und die Indikatoren auf die Adapter stecken. Die benutzte Transportverpackung und die Verschlüsse im Praxisabfall entsorgen
- Das Gerät normal mit Aufbereitungsgütern bestücken
- Die Dosierung des Pflegeöls durch betätigen der entsprechenden Taste ausschalten, da dies die Laborwerte negativ beeinflusst
- Das Programm starten

Nach Ende des Programmes:

- Die Indikatoren von den Adaptern durch Druck auf den blauen Ring lösen und die Indikatoren einzeln in je eine unbenutzte Sterilgutverpackung füllen
- Den Untersuchungsauftrag ausfüllen und mit den aufbereiteten Indikatoren dem Labor zur Feststellung des Resteiweißgehaltes zur Auswertung übersenden

Spülung realverschmutzter Instrumente mit SDS-Lösung

SDS-Spüllösung mit einer Spritze aufziehen und durch das Instrument in das Gefäß zurückspülen. Den Vorgang nach einer Ruhezeit von 10 Minuten zweimal wiederholen. Anschließend das Röhrchen schließen.

Versand und Auswertung:

Den Untersuchungsauftrag im Bereich Probenahme ausfüllen, unterzeichnen und mit den aufbereiteten Indikatoren bzw. der SDS-Lösung an das Labor biocheck zur Auswertung/Bestimmung des Resteiweißgehaltes übersenden.

Probenahme und Transport sind nicht Teil der Akkreditierung des Labors.
Ausgabe: 01/2026