

Prüfung von Vaporisatoren Arbeitsanleitung zur Handhabung der Bioindikatoren

Diese Arbeitsanleitung zur Handhabung der Bioindikatoren bei Probenahme, Lagerung und Transport dient der Qualitätssicherung im Rahmen der Prüftätigkeit des Labors biocheck.

Produkt: BI-DD-75

Hinweis: Es sollte jedes Programm des Vaporisators getestet werden. Grundsätzlich sollten die Bioindikatoren vor und nach der Prüfung bis zum Versand bei 4 – 8 °C gelagert werden.

Versand: Die Bioindikatoren möglichst bis Donnerstag zum Versand bringen, damit diese nicht über das Wochenende unterwegs sind.

Anzahl der zu verwendenden Bioindikatoren

Für die Prüfung empfehlen wir pro Gerät einen Bioindikator einzusetzen.
Je Prüftag einen Bioindikator als Transportkontrolle verwenden (diese nicht im zu prüfenden Gerät behandeln).

Häufigkeit der Prüfung:

Es wird für Untersuchungen in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens (inklusive Pflegeheime) eine ½-jährliche Leistungsprüfung gefordert.

Vorgehensweise:

1. Die Indikatoren so platzieren, dass diese sich nicht im kochenden Wasser, sondern im Dampfraum des Vaporisators befinden. Den Vaporisator wie üblich befüllen und das Gerät starten. Die Transportkontrolle nicht im Vaporisator behandeln.
2. Nach abgeschlossenem Programm die Indikatoren dem Vaporisator entnehmen und nummerieren.
3. Den Untersuchungsauftrag vollständig ausfüllen, unterzeichnen und mit dem Bioindikator sowie der Transportkontrolle an das Labor biocheck zur Auswertung übersenden.

Probenahme und Transport sind nicht Teil der Akkreditierung des Labors.
Ausgabe: 01/2026