

Prüfung von Dampfdesinfektionsanlagen Arbeitsanleitung zur Handhabung der Bioindikatoren

Diese Arbeitsanleitung zur Handhabung der Bioindikatoren bei Probenahme, Lagerung und Transport dient der Qualitätssicherung im Rahmen der Prüftätigkeit des Labors **biocheck**.

Produkt: BI-DD-75; BI-DD-105

Hinweis: Es sollte jedes Programm des Dampfdesinfektionsapparates getestet werden.
Grundsätzlich sollten die BI-DD-105 bei Umgebungstemperatur (18-25 °C) und die BI-DD-75 vor und nach der Prüfung bis zum Versand bei 4 – 8 °C gelagert werden.

Versand: Mit den Bioindikatoren möglichst bis Mittwoch testen und zum Versand bringen, damit die Indikatoren nicht über das Wochenende unterwegs sind.

Zu prüfende Gerät	Programm z.B.	Bioindikator (Keimträger)	Anzahl der Bioindikatoren je Programm
Dampf-Desinfektionsanlage 75 °C; 105 °C	Matratzen Kissen Decken	Teststreifen	9 + 1 (TK)

Je Prüftag einen Bioindikator als Transportkontrolle (TK) verwenden (diese nicht im Gerät behandeln).

Häufigkeit der Prüfung:

Es wird eine ½-jährlich Prüfung empfohlen.

Vorgehensweise:

1. Die Bioindikatoren nummerieren (keine weitere Beschriftung vornehmen), entsprechend dem eigenen Schema in der Originalverpackung so zwischen den Kissen und Decken verteilen, dass diese an ungünstigster Stelle platziert sind, dann das Programm starten.
Die Transportkontrollen nicht dem Verfahren aussetzen.
2. Den Untersuchungsauftrag mit den entsprechenden Programm- und Geräteangaben sowie den Nummern der Bioindikatoren vollständig im Bereich Probenahme ausfüllen und unterzeichnen.
3. Nach abgeschlossenem Programm die Bioindikatoren nach Programmen getrennt mit dem Untersuchungsauftrag einpacken.
4. Den unterzeichneten Untersuchungsauftrag mit den Bioindikatoren sowie der Transportkontrolle möglichst bis Mittwoch zum Versand bringen und an das Labor **biocheck** zur Auswertung senden.

Probenahme und Transport sind nicht Teil der Akkreditierung des Labors.
Ausgabe: 01/2026