

Prüfung der RDG für MIC-Instrumente und Anästhesiezubehör Arbeitsanleitung zur Handhabung der Reinigungs- und Bioindikatoren

Diese Arbeitsanleitung zur Handhabung der Indikatoren bei Probenahme, Lagerung und Transport dient der Qualitätssicherung im Rahmen der Prüftätigkeit des Labors **biocheck**.

Produkt: RE-EVA-2 (Reinigungsindikator)
BI-EVA-2 (Bioindikator)

Hinweis: Es sollte jedes Programm getestet werden.
Grundsätzlich sollten die Bioindikatoren vor und nach der Prüfung bis zum Versand bei 4 – 8 °C gelagert werden.

Versand: Die Indikatoren spätestens am Mittwoch zum Versand bringen, damit diese nicht über das Wochenende unterwegs sind.

Anzahl der Indikatoren und Häufigkeit der Prüfung:

Es wird die Verwendung von jeweils 5 Reinigungs- und 5 Bioindikatoren empfohlen. Bei Bioindikatoren ist zusätzlich eine Transportkontrolle mitzuführen, die nicht der Testung beigelegt wird. Die Prüfung der Reinigungsleistung und der desinfizierenden Leistung wird ¼-jährlich empfohlen.

Vorgehensweise

1. Die Indikatoren mit Einmalhandschuhen in die Adapter des "RDG-CHECK" des Labors **biocheck** einlegen. Den RDG-Check mit den entsprechenden Adaptern an die Anschlüsse für MIC-Instrumente, Luer-Lock-Anschlüsse oder Schlauchanschlüsse anschließen.
Die Transportkontrolle (Bioindikator) nicht dem Spülprozess aussetzen.
2. Bei der Prüfung sollten, soweit möglich, die verschiedenartigen Anschlüsse unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Druckverhältnisse geprüft werden.
3. Die Kunststoffröhrchen, in denen sich die Edelstahlplättchen befanden, zum normalen Abfall geben.
4. Die Spülmaschine wie üblich beladen und einschalten.
5. Programmende:
Nach abgeschlossenem Spülprogramm die Edelstahlplättchen mit sterilen oder in dem geprüften Gerät gespülten Pinzetten oder sterilen Einmalhandschuhen in die mitgelieferten sterilen Röhrchen überführen. Pro Röhrchen nur 1 Indikator einfüllen!
6. Die Röhrchen nummerieren und sowohl die Nummerierung als auch die Platzierung der Indikatoren im Gerät im Untersuchungsauftrag im Bereich Probenahme vollständig eintragen und unterzeichnen.
7. Die Indikatoren getrennt nach Programmen in eine Tüte verpacken und mit den Untersuchungsaufträgen sowie den Transportkontrollen an das Labor **biocheck** zur Auswertung übersenden.

Probenahme und Transport sind nicht Teil der Akkreditierung des Labors.
Ausgabe: 01/2026