

Prüfung des HD 450

Arbeitsanleitung zur Handhabung der Reinigungsindikatoren

Produkt: **HD-CHECK**
 RE-TVA-1
 RE-CVA-1

Die Produkte sind zur Validierung, Leistungsbeurteilung und Routinekontrolle geeignet. Die Prüfung der Reinigungsleistung mit Reinigungsindikatoren ist gemäß den Vorschriften ¼-jährlich erforderlich, um die Stabilität der Prozesse zu belegen. Dies gilt auch bei jährlicher Leistungsbeurteilung der Geräte.



Bild 1: HD-CHECK

Der Adapter (Bild 1) wird an einen Anschluss für z.B. Winkelstücke (Bild 2) aufgesteckt. Anschließend wird der Indikator (Bild 3) am Adapter adaptiert.

Crile-Klemme zur Simulation von Instrumenten



Bild 2: Winkelstück



Bild 3: RE-TVA-1



Bild 4: RE-CVA-1

Wir empfehlen die Prüfung der Anschlussleiste zur Aufbereitung von Winkelstücken und Turbinen mit 2 Indikatoren (siehe Bild 3) und die Prüfung der Instrumentenaufbereitung mit 5 Indikatoren (siehe Bild 4).

Vorgehensweise:

- Die endständigen Anschlüsse der Spüleiste mit je einem Adapter (Bild 1) bestücken
- Indikatoren (Bild 3) aus der Verpackung nehmen, die Verschlüsse an den Enden entfernen, die Indikatoren in die Adapter stecken. Die benutzte Transportverpackung und die Verschlüsse im Praxisabfall entsorgen
- Die Crile-Klemmen (Bild 4) aus der Verpackung nehmen, im Winkel von ca. 90 ° öffnen, auf die Klemmenleiste stecken oder auf das Instrumentensieb legen. Die benutzte Verpackung im Praxisabfall entsorgen
- Das Gerät normal mit Aufbereitungsgütern bestücken
- Das Programm starten.

Nach Ende des Programmes:

- Die Indikatoren von den Adaptern durch Druck auf den blauen Ring lösen und in die unbenutzte Verpackung füllen
- Die Crile-Klemmen der Aufbereitungsanlage entnehmen, schließen und einzeln in je eine unbenutzte Verpackung füllen

Versand und Auswertung:

Den Untersuchungsauftrag im Bereich Probenahme ausfüllen, unterzeichnen und mit den aufbereiteten Indikatoren an das Labor biocheck zur Bestimmung des Resteiweißgehaltes übersenden.

Probenahme und Transport sind nicht Teil der Akkreditierung des Labors.
Ausgabe: 01/2026